



Oxivir Excel® CE

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na neinvazívne zdravotnícke pomôcky

Popis

Diversey Oxivir Excel CE je vysoko koncentrovaný jedнокrokový čistiaci a dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom účinnosti a krátkou kontaktnou dobou. Na základe patentovanej technológie Diversey AHP (akcelerovaný peroxid vodíku) môže byť prostriedok používaný na neinvazívne zdravotnícke pomôcky, na tvrdé neporézne povrchy a niektoré mäkké povrchy.

Kľúčové vlastnosti

- Baktericídny, virucídny a účinný proti kvasinkám
- Dezinfikuje už za 1 minútu
- Bezpečný k užívateľom i povrchom
- Efektívne čistí
- Pohodlné použitie
- Bez parfumácie
- Rozloží sa na vodu a kyslík
- Nie je potrebné oplachovať

Výhody

- Široká účinnosť poskytuje najvyššiu úroveň ochrany pacienta. Dôkladne testovaný európskymi normami. Je efektívny proti niekoľkým patogénom, plne virucídny vrátane Poliovirus, Adenovirus, a Murine norovirus. Efektívny tiež proti obaleným vírusom ako sú: HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus a Coronavirus.
- Počas krátkej kontaktnéj doby zostávajú povrchy mokré, vďaka tomu je zaručená dezinfekčná účinnosť.
- Skvelé čistiace vlastnosti vrátane odvápnenia a schopnosti zabraňovať opätovnému usadzovaniu eliminujú nutnosť predčistenia.
- Skvelé výsledky bezpečnosti pri používaní redujú pracovné riziko. Bez nebezpečenstva pri použití. Nedráždi respiračné ústroje.
- AHP technológia je šetrná k povrchom, a tým predlžuje ich životnosť.
- Vhodný na použitie vo vysoko rizikových oblastiach v zdravotníctve, vrátane OR, ICU (Jednotka intenzívnej starostlivosti), NICU (Starostlivosť o novorodencov/ neonatologie) a tiež v izbách pacientov.

Nie je určené na použitie na invazívne zdravotnícke pomôcky.

Návod na použitie


Sprejové čistenie a dezinfekcia:

1. Odstráňte hrubé nečistoty.
2. Aplikujte na povrch buď nastriekaním na utierku a zotretím povrchu alebo naneste priamo na povrch postrekom zo spreja.
3. Po uplynutí kontaktnéj doby*, buď utrite do sucha alebo nechajte oschnúť na vzduchu.

**Dávkovanie je stanovené na základe optimálnych podmienok, jednotlivé odporúčania sa preto môžu líšiť. Optimálne použitie a dávkovanie stanoví na mieste odborný poradca Diversey.*

CE
0088

AHP®
Patented

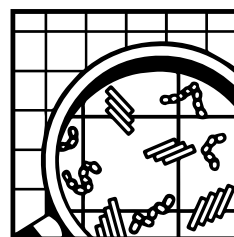

© A.I.S.E.



Oxivir Excel® CE

Čistenie a dezinfekcia v nádobe/vedre:

1. Odstráňte hrubé nečistoty.
2. Naneste na povrch mopom alebo handrou.
3. Po uplynutí kontaktnej doby* utrite do sucha alebo nechajte oschnúť na vzduchu.
4. Vymeňte vodu alebo celkové riešenie v prípade viditeľného zašpinenia alebo aspoň každých 24 hodín.

Systém stierania suchými utierkami na jedno použitie:

1. Pripravte si Systém stierania suchými utierkami na jedno použitie podľa inštrukcií.
2. Odstráňte hrubé nečistoty.
3. Vyberte jednu utierku a utrite povrch.
4. Po uplynutí kontaktnej doby* utrite do sucha alebo nechajte oschnúť na vzduchu.
5. Vymeňte utierku, pokiaľ je viditeľne zašpinená alebo sa presuňte na inú čistenú oblasť.

*Zaistite, že povrch zostane mokrý počas celej kontaktnej doby.

Dávkovanie:

Ak chcete dosiahnuť dezinfekčné účinnosti, dodržujte odporúčané dávkovanie (pozri tabuľku).

Technické údaje

Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina

pH (neriedený): 0,55

pH (pri použití): 1,95

Relatívna hustota (20°C): 1.000

Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diverseym.com.

Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt. Len pre profesionálne použitie. Reaguje s oxidovateľnými látkami. Čas použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

Kompatibilita prostriedku

Dôležité: Nemiešajte s inými prostriedkami. Nepoužívajte teplú vodu. Nepoužívajte na povrchy citlivé na vodu alebo kyselinu. Pri dodržaní doporučených podmienok je Diversey Oxivir Excel CE vhodný na použitie na väčšinu materiálov.

Mikrobiologické údaje

Preukázaná účinnosť podľa európskych noriem EN13727, EN13624, EN14476 a EN16615.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Povrchovo aktívne látky použité v tomto výrobku sú biologicky odbúratelné v súlade s požiadavkami nariadenia EÚ o detergentoch EC 648/2004.

Dostupné balenia

Oxivir Excel CE je k dispozícii v balení 2x5L.